



Guide de référence rapide

HYDRIM® L110w

Lavage adéquat des instruments


- Éliminez toute trace de ciment, d'amalgame et de composite dès la fin de la consultation
- Ne placez pas les fraises dans l'Hydrim.
- Ne laissez pas les instruments sécher pendant plus d'une heure avant de les traiter dans l'Hydrim
- Chargez les cassettes et les paniers selon les directives du fabricant. Ne surchargez pas.
- Pour les cassettes et instruments à charnière, utilisez le cycle intensif.
- Placez les objets petits ou légers dans le panier à couvercle
- Ne placez pas les instruments en aluminium anodisé dans l'Hydrim

Comment utiliser l'Hydrim


1. Mettez l'appareil en marche.
2. Touchez l'écran pour débiter.
3. Touchez le symbole de déverrouillage.
4. Chargez les instruments et les cassettes dans l'appareil.
5. Refermez la porte.
6. Sélectionnez le cycle désiré. La porte se verrouille durant le cycle.
7. Lorsque le message cycle terminé apparaît, touchez le symbole de déverrouillage et videz.

Remplacement de la solution nettoyante HIP


Lorsque le message Aucun détergent apparaît, c'est que le récipient de solution nettoyante HIP est vide et doit être changé (no de pièce CS-HIPL).

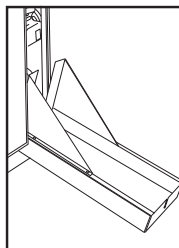


Ouvrir le tiroir à solution de nettoyage.

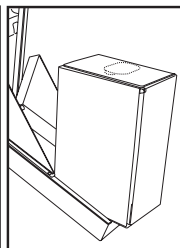


Mettre une nouvelle boîte de solution de nettoyage à l'envers dans le tiroir.

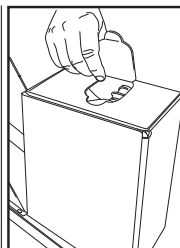

Ouvrir la languette en la déchirant.

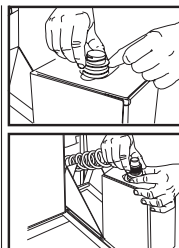

Sortir le bec et retirer le capuchon de protection. Brancher le tuyau.

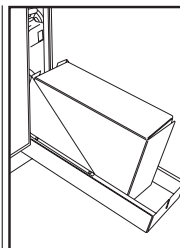


Placer la boîte dans le tiroir à solution de nettoyage et fermer le tiroir.

Nettoyage du filtre

Si le filtre contient des débris, retirez-les, rincez-les à l'eau claire et replacez-le. Assurez-vous que le filtre est solidement fixé.

Nettoyage des gicleurs

Si les gicleurs ne tournent pas aisément, retirez-les, rincez-les à l'eau claire et réassemblez-les. Pour retirer le gicleur supérieur ou central, dévissez le collet dans le sens anti-horaire. Pour retirer le gicleur inférieur, dévissez le collet dans le sens horaire.

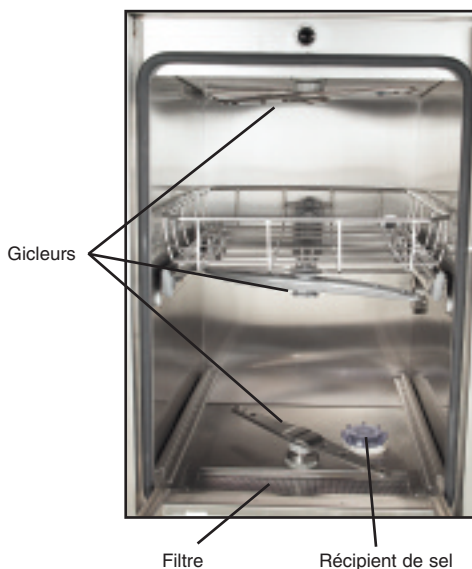

Remplissage du réservoir de sel adoucisseur d'eau (si utilisé)

Lorsque le message niveau de sel bas apparaît, c'est que le réservoir de sel doit être rempli. Dévissez le couvercle du récipient de sel. Ajoutez 1 kg / 2,2 lb de sel. Replacez le couvercle en vous assurant qu'il est bien serré. Effectuez un cycle complet sans instruments.

Messages d'erreur

Erreur	Cause	Solution
CF1 Échec Chauff.	L'eau n'atteint pas la température requise dans les temps spécifiés.	Appelez un technicien.
CF2 Rempl. Chambre	L'eau ne remplit pas la cuve dans les temps spécifiés.	Assurez-vous que les tuyaux d'alimentation en eau flexibles ne sont pas tordus. Ouvrez les vannes d'arrêt d'eau.
CF3 Cap. Temp. 1 Défec.	Capteur défectueux.	Appelez un technicien.
CF4 Panne Évac.	L'eau ne se vidange pas.	Assurez-vous que le boyau de vidange n'est pas tordu. Assurez-vous que le filtre de la partie inférieure de la cuve n'est pas obstrué.
CF9 Dépass T Prog	La durée d'un cycle est supérieure à 2 hres 30 min.	Appelez un technicien.
CF11 Aucun Déterg.	L'interrupteur de débit ne détecte pas le détergent durant la phase de lavage.	Remplacez la boîte de détergent si elle est vide. Si le problème persiste, appelez un technicien.
CF14 Cont. Déb Déf.	L'interrupteur de débit est coincé à la position fermée.	Appelez un technicien.
CF15 Débordement de la chambre	L'interrupteur de débordement ne s'arrête pas après 30 secondes de fonctionnement de la pompe de vidange.	Vérifiez si le drain est bloqué; appelez un technicien.