

Désinfection orale photosensible Aseptim

Le système Aseptim Plus utilise la désinfection photosensible pour éliminer les bactéries dans le traitement des canaux radiculaires, d'une maladie parodontale, d'une péri-implantite et de caries en éliminant toutes les espèces de bactéries orales sur demande. La technologie Aseptim est corroborée par une liste complète d'études microbiologiques et cliniques publiées et approuvées par des confrères.

Comment fonctionne la technologie Aseptim Plus

La technologie Aseptim est basée sur deux composants : une solution de chlorure de tolonium (un colorant vital) dilué et de qualité pharmaceutique avec une lumière d'une longueur d'onde spécifique (635 nm) pour activer la solution Aseptim.

Introduite dans le tissu osseux ou mou, la solution Aseptim cible et attaque toutes les bactéries. Quand la solution est activée par la lumière Aseptim, elle dégage de l'oxygène singulet qui détruit les parois cellulaires des bactéries, les tuant en quelques secondes^{1,2,3,5}.

La solution Aseptim élimine de façon sélective toutes les bactéries et, contrairement à certaines méthodes de désinfection, n'affecte pas les tissus sains environnants et ne tache pas les tissus mous ni la restauration dentaire.



Des avantages uniques pour le dentiste


- Aseptim Plus tue toutes les bactéries associées à tous les types de lésions orales
- Aseptim Plus économise du temps et permet un traitement endodontique en une seule visite
- Aseptim Plus n'agit qu'au niveau du site d'infection, réduisant ainsi la nécessité d'autres produits antimicrobiens localisés ou systémiques.
- Aseptim Plus nécessite une invasion minimale et représente un ajout simple à votre procédure restauratrice habituelle
- Aseptim Plus améliore et accélère le processus de guérison
- Aseptim Plus est un traitement sans douleur, particulièrement bien accueilli par les enfants
- Aseptim Plus est un traitement sûr, sans effet secondaire
- L'unité Aseptim Plus est petite et portable, pour un maximum de souplesse et de facilité

Et des avantages importants pour les patients

- Réduction du temps nécessaire pour un traitement de canal radiculaire
- Moins de probabilités d'échec lors des traitements de canal
- Moins de traitement complexe des poches parodontales
- Moins de probabilités d'échec lors d'implants
- Réduction du besoin en antimicrobiens agressifs et en antibiotiques systémiques
- Préparation moins invasive de la cavité
- Moins de risques d'exposition pulpaire dans le traitement des caries profondes
- Moins de risques de perte d'une dent
- Moins de traumatisme pour les enfants et les phobiques dentaires



Embouts jetable Aseptim Plus conçus pour le traitement des poches parodontales et en endodontie.

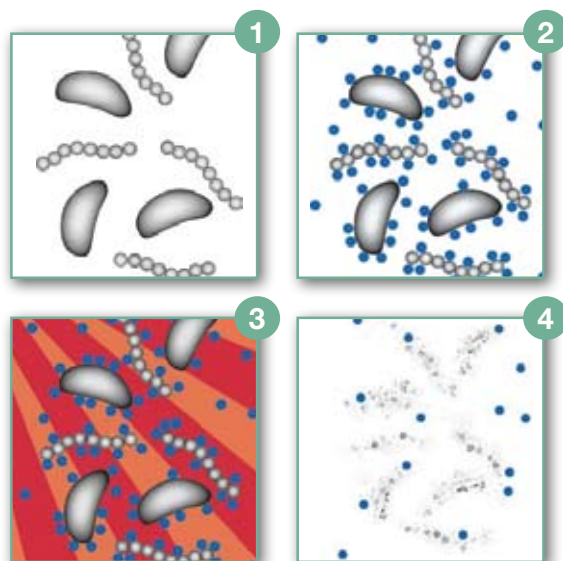

Aseptim Plus est efficace sur les bactéries trouvées dans les canaux radiculaires, dans les poches parodontales, dans la péri-implantite et dans une dent cariée.

Aseptim Plus tue toutes les bactéries y compris :

- *Streptococcus mutans*
- *Total streptococcus*
- *Streptococcus sobrinus*
- *Streptococcus intermedius*
- *Actinomyces*
- *Lactobacillus*
- *Veillonella*
- *Prevotella intermedia*
- *Peptostreptococcus micros*
- *Fusobacterium nucleatum*
- *Porphyromonas gingivalis*
- *Staphalococcus aureus*
- *E.faecalis*

Aseptim Plus tue également les *Candida Albicans*.

Conçu pour la pratique dentaire actuelle

Aseptim Plus représente une véritable avancée dans le traitement dentaire le moins invasif possible. Il procure une désinfection régulière, rapide, efficace et simple, sans effet secondaire, des éléments suivants :

- canaux radiculaires
- poches parodontales
- péri-implantite
- lésions cariées

Pour le praticien, Aseptim Plus présente quatre avantages importants :

- Économie de temps – traitement réduit et traitement possible en une seule visite
- Épargne le tissu support en cas de maladie parodontale, ~ sans antibiotiques
- Économise des implants coûteux par désinfection totale du site de l'implant avant mise en place et également de l'implant et des tissus environnants en cas d'infection.
- Épargne les tissus osseux avec une invasion minimale et encourage le processus de reminéralisation naturelle.

Ainsi, il contribuera à la croissance de votre cabinet. En outre, le coût moindre du traitement Aseptim est acceptable pour les patients et génère un revenu supplémentaire pour le cabinet. En effet, le coût initial d'achat d'une unité Aseptim Plus est habituellement amorti dans les mois qui suivent.



COMMENTAIRES D'UTILISATEUR :

Selon mon expérience clinique, la procédure de désinfection photosensible (PAD) Aseptim est une technologie efficace pour atteindre une désinfection régulière dans le traitement des canaux radiculaires. Associer la technologie PAD avec des technologies de préparation et de désinfection mécanique et chimique des canaux radiculaires dans les règles de l'art pourrait augmenter la probabilité de traitements en une seule visite.

– *Professor Liviu Steier*

La procédure de désinfection photosensible (PAD) Aseptim est un moyen rentable et bénéfique de traiter une maladie parodontale. Cela a révolutionné la façon de travailler du cabinet et cela nous a permis d'obtenir des résultats très prévisibles, même dans des cas auparavant vains ou complexes. À mon avis, cela fonctionne mieux qu'aucun autre complément antimicrobien actuellement disponible.

– *Phil Lucas*
Senior Hygienist, Liverpool, Merseyside, Royaume-Uni

Je suis un dentiste de trente ans d'expérience, en activité à Dubaï, et j'utilise Aseptim depuis environ deux ans, c'est-à-dire que j'ai traité environ 1 500 patients avec ce système. J'ai remarqué que les patients se sentaient très bien et ne souffraient pas du tout lors des traitements par Aseptim. J'ai également assuré aux patients qu'il n'y aurait pas de douleur postopératoire. Je me sens très en confiance avec ce produit et je suis impressionné par les résultats.

Je suis la plupart des patients tous les trois mois et il s'agit dans la plupart des cas de caries profondes et parfois de canaux radiculaires. Ce produit est très bénéfique à mon cabinet et je suis très fier d'utiliser la technologie Aseptim.

– *Docteur Zeinab Tawfik*



ASEPTIM™ Plus désinfection orale photosensible

Désinfection efficace et rapide des caries, en endodontie, parodontie et en cas de péri-implantite

SciCan
A HIGHER STANDARD

SciCan Ltd.

1440 Don Mills Road, Toronto, Ontario M3B 3P9
Tél: (416) 445-1600
sans frais 1-800-667-7733 Fax (416) 445-2727
custservice.ca@scican.com

Aseptim est une marque commerciales de SciCan Ltd.

SD-304-F 02/09

SciCan
A HIGHER STANDARD